


Manuel d'utilisation **e-pill® Multi Alarmes PLUS**

Indicateur d'oubli de prise de médicaments

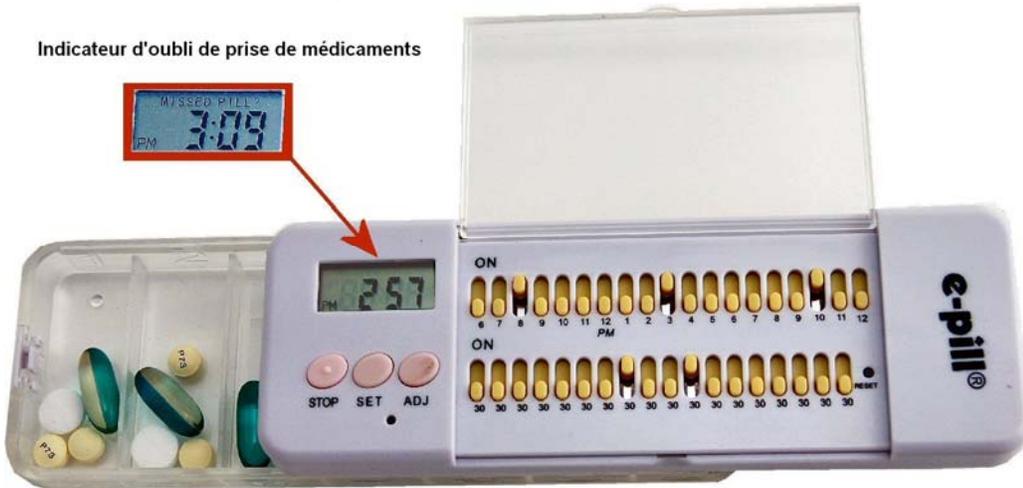

REGLAGES

Réglage de l'heure

Si l'heure n'est pas affichée, enlever le film de protection qui se trouve à l'arrière du pilulier au niveau des piles.

- Appuyer sans relâcher sur le bouton SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure clignote. Relâcher le bouton SET.
- Appuyer sur le bouton ADJ pour régler l'heure.
- Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce que les minutes commencent à clignoter.
- Appuyer sur le bouton ADJ pour régler les minutes.
- Appuyer sur le bouton SET pour sauvegarder le réglage de l'heure.
- Si c'est nécessaire, appuyer sur le bouton ADJ après le réglage de l'heure pour basculer du mode 12h (AM/PM) au mode 24h.

Réglage des alarmes (jusqu'à 37 par jour)

Sur l'image ci dessus, le pilulier a été réglé pour sonner aux heures suivantes : 8h, 13h30 (1:30PM), 15h (3PM), 16h30 (3:30PM) et 22h (10PM). Sur l'image à droite, l'alarme est réglée à 7h30.


- Ouvrir le cache supérieur.
- Pour chaque alarme, pousser le curseur correspondant à votre heure de prise de médicament vers le haut (symbole ON).
- Pour le réglage des demi-heures, glisser le curseur correspondant aux demi-heures ('30') vers le haut (symbole ON). Utiliser uniquement les curseur de la ligne du bas pour le réglage des demi-heures.
- Fermer le cache supérieur. Les alarmes sonneront automatiquement chaque jour aux heures programmées.



AU MOMENT DES PRISES DE MEDICAMENT

Que faire quand l'alarme sonne ?

- Prenez vos médicaments.
- Appuyer sur le bouton STOP pour arrêter l'alarme une fois que vous avez pris vos médicaments. L'alarme sonne pendant une durée totale de 4 minutes. Si vous n'appuyez pas sur le bouton STOP pendant ces 4 minutes, le message "MISSED PILL?" (« Oubli de prise de médicaments ») s'affiche sur l'écran en clignotant.

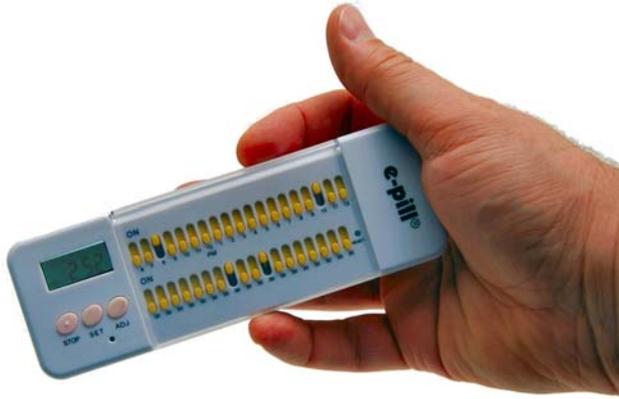

Que faire si l'indicateur d'oubli de prise de médicaments 'MISSED PILL' s'affiche ?

Si l'indicateur d'oubli s'affiche :

- Prenez vos médicaments.
- Appuyez sur le bouton STOP pour que l'indicateur d'oubli ne s'affiche plus

A propos du boîtier à comprimés

Votre e-pill est équipé d'un boîtier composé de 7 compartiments pour stocker vos comprimés. Chaque compartiment est identifié par les initiales

de chaque jour de la semaine ('M' : lundi, 'T' : mardi, 'W' : mercredi, 'T' : jeudi, 'F' : vendredi, 'S' : samedi, 'S' : dimanche) sur la face avant et par les chiffres 1 à 7 sur la face arrière.

- Pour ouvrir le boîtier, vérifier que le système est déverrouillé (position vers le bas).
- Faire glisser la face supérieure (celle avec l'heure) vers la droite. Les compartiments à comprimés deviennent accessibles.
- Prenez vos médicaments.
- Refermer le boîtier en faisant glisser la face supérieure dans l'autre sens (vers la gauche) jusqu'à ce qu'il clique.



Déverrouillé
(bas)

Remplacement des piles

Le pilulier fonctionne avec 2 piles AAA. En fonctionnement normal, la durée de vie des piles est de 12 mois. Si le niveau de piles est faible, un signal sonore se répète toutes les 15 minutes et un indicateur de piles faibles s'affiche sur l'écran. Retourner l'appareil et enlever le boîtier coulissant. Enlever les 2 vis situés au niveau du compartiment à piles. Remplacer les piles avec 2 piles neuves alcalines AAA. Refermer le cache et remettre en place les vis.

- Appuyer sur le bouton RESET (bouton gris sous le cache) et régler l'heure.

Avertissement: Ce pilulier rappel médicament est uniquement un aide-mémoire pour vous aider à prendre vos médicaments. L'utilisateur conserve l'entière responsabilité d'administrer des médicaments aux moments appropriés. E-pill, LLC n'assume aucune responsabilité quant aux dommages directs ou consécutifs, y compris, les dommages ou les blessures résultant d'un dysfonctionnement du produit. La responsabilité de E-pill LLC ne pourrait en aucun cas dépasser le montant payé par l'utilisateur pour le pilulier électronique.

